

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

WIEDZA PIERWSZEJ POMOCY

www.praes.pl



SAFETY AT WORK

SERIA
PRODUKTOWA

plum
Safety

W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie stosować odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy. Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma decydujące znaczenie w kontekście uratowania wzroku. Niniejsza broszura pomoże Ci pogłębić wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń oczu.

www.praes.pl

Ratowanie oczu !

STOSUJĄC ODPOWIEDNIE ŚRODKI, MASZ WIĘKSZĄ SZANSĘ URATOWAĆ OCZY

W momencie kontaktu kwasu lub zasady z okiem dochodzi do zmiany pH w oku i wskutek tego do podrażnienia. W momencie wypadku najważniejsze jest maksymalnie szybkie rozpoczęcie wymywania z oka niebezpiecznych substancji chemicznych i przywrócenie naturalnego poziomu pH. Dlatego płukanka do oczu Cederroth jest roztworem buforującym. Płukanka działa jak nawilżacz i przywraca normalne pH w oku skuteczniej niż roztwór soli kuchennej.


Zasady wnikają głębiej w strukturę oka i mogą spowodować poważne, często nieodwracalne, uszkodzenia wzroku.

Kwasy powodują podrażnienie zewnętrznych części oka, w przypadku których nie dochodzi zwykle do uszkodzenia wzroku.

Substancje zasadowe są przyczyną większości wszystkich poważnych uszkodzeń oka.

Rynienka pomaga również utrzymać oko otwarte podczas przemywania.

Osoba towarzysząca poszkodowanemu może sprawdzić, czy przemywane oko jest otwarte, ponieważ rynienka jest przezroczysta.

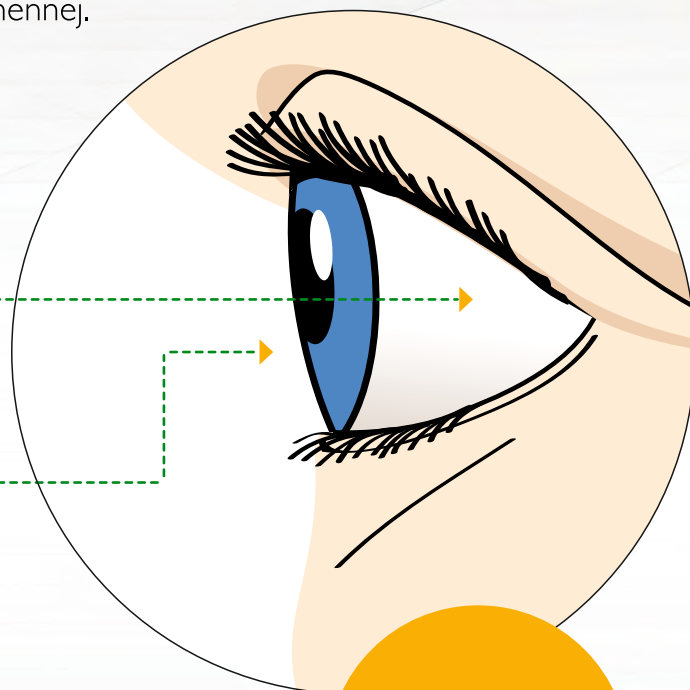

UNIKALNY
KSZTAŁT!



JAKIE RYZYKO WYSTĘPUJE W TWOIM MIEJSCU PRACY?

W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie sprecyzować zasady postępowania w razie wypadku. Do przedostania się substancji drażniącej do oka dochodzi najczęściej w wyniku **wybuchu akumulatora, narażenia na kontakt z drobinami ługu, amoniaku, cementu, wapna, przemysłowych płynów do naczyń, środków czyszczących, niektórych proszków do prania, środków odtłuszczających, farby sody kalcynowanej i kleju**. Również drobinę metali, brud i kurz należy natychmiast wymyć z oka, aby nie pozostały w nim na dłużej.

W optymalnych warunkach butelka z płynem powinna znajdować się w uchwycie ściennym – wówczas będzie mieć stałe miejsce, aby każdy wiedział, gdzie jej szukać.

Oznakowanie sprzętu pierwszej pomocy ma ważne znaczenie

Fosforyzujące plansze Cederroth z twardego tworzywa świecą w ciemności po pochłonięciu promieniowania słonecznego lub innego rodzaju światła. Dwustronne do montażu na ścianie poprzecznie do niej lub do zwieszenia z sufitu.

Pamiętaj!

Butelki z płynem do przemywania oczu powinny zawsze stać w miejscu, gdzie jest największe ryzyko wystąpienia wypadku skutkującego uszkodzeniem oka, gdyż szybkie rozpoczęcie przemywania oka ma kluczowe znaczenie. Złotą zasadą jest umieszczenie butelki z płynem w zasięgu ręki.

Więcej butelek w gotowości



Aby móc przemywać oko przez dłuższą chwilę oraz zabrać zapas butelek na czas transportu do szpitala.

W przypadku uszkodzenia oka należy pamiętać, aby zawsze zasięgnąć porady lekarza!

Zabrać kilka butelek roztworu do przemywania na czas transportu do szpitala. Jeśli nie ma dostępu do środków pierwszej pomocy, użyć letniej wody i kubka.



RATOWANIE OCZU

1 Szybko zacząć przemywanie.

Efekt jest najlepszy w pierwszych sekundach po kontakcie.

2 Mocno przemywać.

Podczas przemywania oko musi być otwarte. Aby utrzymać oko otwarte, należy sobie pomóc palcami.

3 Długo przemywać.

Przemywać przez co najmniej 15 minut. Użyć kilku butelek roztworu lub kontynuować przemywanie w stacjonarnej myjce do oczu.



Plan pierwszej pomocy

CZYNNIK SZKODLIWY	PIERWSZE PŁUKANIE	DRUGIE PŁUKANIE	CZAS PŁUKANIA
Ciała obce Kurz, brud, opiłki metalu, odłamki drewna, itp.	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Oko należy przepłukiwać do czasu usunięcia ciała obcego.
Kwasy	pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukiwać płynem pH Neutral do opróżnienia butelki, a następnie kontynuować płynem PLUM Eye Wash do czasu zniknięcia uczucia dyskomfortu lub do czasu uzyskania pomocy lekarskiej.
Zasady (Z wyjątkiem substancji szkodliwych zawierających wapń, np. zaprawa murarska, cement)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukiwać płynem pH Neutral do opróżnienia butelki, a następnie kontynuować płynem PLUM Eye Wash do czasu zniknięcia uczucia dyskomfortu lub do czasu uzyskania pomocy lekarskiej.
Inne substancje chemiczne	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Oko należy przepłukiwać do czasu zniknięcia uczucia dyskomfortu lub do czasu uzyskania pomocy lekarskiej.
Chemiczne urazy skóry	pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukiwać płynem pH Neutral do opróżnienia butelki, a następnie kontynuować płynem PLUM Eye Wash do czasu zniknięcia uczucia dyskomfortu lub do czasu uzyskania pomocy lekarskiej.

Uwaga! Płyn należy dawkować równym, delikatnym strumieniem. Butelkę lekko ścisnąć, nie używając nadmiernej siły.



Butelkę należy wyjąć z uchwytu w pozycji pionowej.



Przekręcić końcówkę, aż złamie się zabezpieczenie.



Odchylić głowę do tyłu, przyłożyć końcówkę do oka i płukać.



W przypadku urazów mechanicznych przy płukaniu można pochylić się do rzodu.

Pieczątką przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
 Polska / Poland 
biuro@praes.pl