

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

SPRAY RATUNKOWY

MOBILNY PRYSZNIC BEZPIECZENSTWA

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA



W miejscu pracy, w którym ryzyko uszkodzenia wzroku jest duże, należy koniecznie stosować odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy. Jeśli doszło do kontaktu oka z niebezpieczną substancją, szybkie udzielenie pierwszej pomocy ma decydujące znaczenie w kontekście uratowania wzroku. Niniejsza broszura pomoże Ci pogłębić wiedzę na temat pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń oczu.

www.praes.pl

PLUM BODYNEUTRALL

100 ML, 600 ML I 5 L

Przenośny prysznic do pierwszej pomocy w razie wypadków z substancjami chemicznymi. Przenośny prysznic do pierwszej pomocy w razie wypadków z substancjami chemicznymi.

Mobilny prysznic do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków chemicznych !



Czym jest Plum BodyNeutrAll?

Plum BodyNeutrAll to spray ratunkowy przeznaczony do stosowania na nieuszkodzoną skórę, odzież i przedmioty przez osoby przeszkolone. Jest to wyrób medyczny certyfikowany w Unii Europejskiej do odkażania nieuszkodzonej skóry i odzieży po kontakcie ze środkami tleniającymi, kwasami, zasadami, aldehydami, kwasem fluorowodorowym i fluorkami.

Jak działa Plum BodyNeutrAll?

Plum BodyNeutrAll zawiera kwas askorbinowy, bufor aminokwasowy oraz jony wapnia jako substancje czynne. Gliceryna, polietylen i glikol są substancjami solubilizującymi dla związków organicznych.

- Redukuje silne utleniacze (takie jak chlor, podchloryn, dwutlenek chloru, chloramina, brom, jod, fluor, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy) do związków, które nie wykazują już aktywności.
- Wiąże aldehydy w iminy, fenole w aminy, a metale ciężkie w kompleksy aminowe, wiąże kwas fluorowodorowy i fluorki w słabo rozpuszczalny fluorek wapnia, rozpuszcza rozpuszczalniki organiczne i substancje chemiczne.
- Czerwone zabarwienie spryskanego obszaru wskazuje, że środki utleniające zostały dezaktywowane.

100 ml



1



2



3



4



Sposób użycia: W ciągu pierwszych dwóch minut należy dokładnie spryskać preparatem dotknięte obszary skóry, odzież, sprzęt i powierzchnie. Odczekać 30 sekund, aby preparat zadziałał. Jeśli to możliwe, następnie spłukać wodą.

- PRZECZYTAJ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA PRZED UŻYCIEM
- OBFICIE ZWILŻYĆ DOTKNIĘTE OBSZARY SKÓRY
- ODCZEKAĆ 30 SEKUND AŻ PRZEPARAT ZACZNIE DZIAŁAĆ
- DOKŁADNIE SPŁUKAĆ

NIEZALEŻNIE JAKIEJ WERSJI UŻYWASZ ...

2 x 300



1



2



5 l



1



2



**Nie stosować produktu w okolicach oczu, na błonach śluzowych ani na uszkodzonej skórze.
Nie stosować w przypadku wypadków związanych ze stężonym kwasem siarkowym. W razie kontaktu przepłukać wodą lub sterylnym roztworem do płukania**

Czy występują jakieś skutki uboczne?


Produkt Plum BodyNeutrAll został przebadany dermatologicznie pod kątem tolerancji skórnej. Przy przestrzeganiu instrukcji stosowania nie wywołuje on żadnych niepożądanych reakcji skórnych (alergii) ani nie działa drażniąco na skórę. W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa: **Plum Safety ApS +45 69 16 96 00 lub info@plum.eu**.

Czy Plum BodyNeutrAll jest substancją niebezpieczną lub towarem niebezpiecznym?

Plum BodyNeutrAll nie jest łatwopalny, nie ma właściwości żrących ani nie jest szkodliwy dla zdrowia, a zatem nie stanowi substancji niebezpiecznej ani towaru niebezpiecznego.

Jak utylizować Plum BodyNeutrAll?

Niewykorzystany roztwór i nie do końca opróżnione butelki należy utylizować zgodnie z oficjalnymi przepisami. Kod odpadu: 200130 (odpady komunalne, środki czyszczące). Opakowania należy utylizować zgodnie z dyrektywą 97/129/WE. **Nie wylewać zawartości butelek do ścieków!**

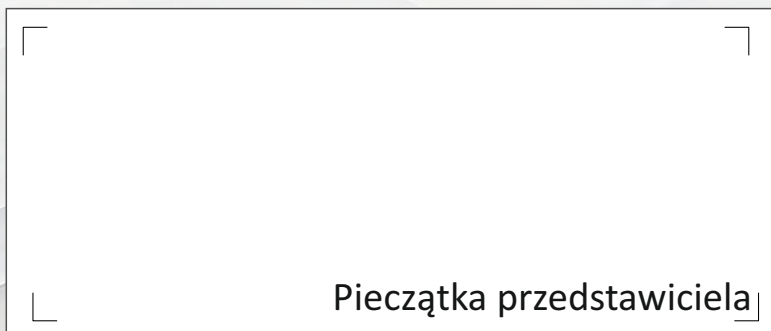

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl